



Hautklammergerät & Klammerentferner

SKIN Stapler & Remover

Produkt:

Hautklammergerät mit 35 Klammern (SMZS35W)
Klammerentferner (SMZSR)

ergonomisches und benutzerfreundliches Design


- ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld
- die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen

Anwendungsgebiet/ Produktbeschreibung:

Hautklammergerät steril und für den Gebrauch für jeweils einen Patienten bestimmt.

Indikationen:

Klammern sind zur Verwendung in der abdominalen, thorakalen, gynäkologischen und orthopädischen Chirurgie zum Verschluss der Haut bestimmt

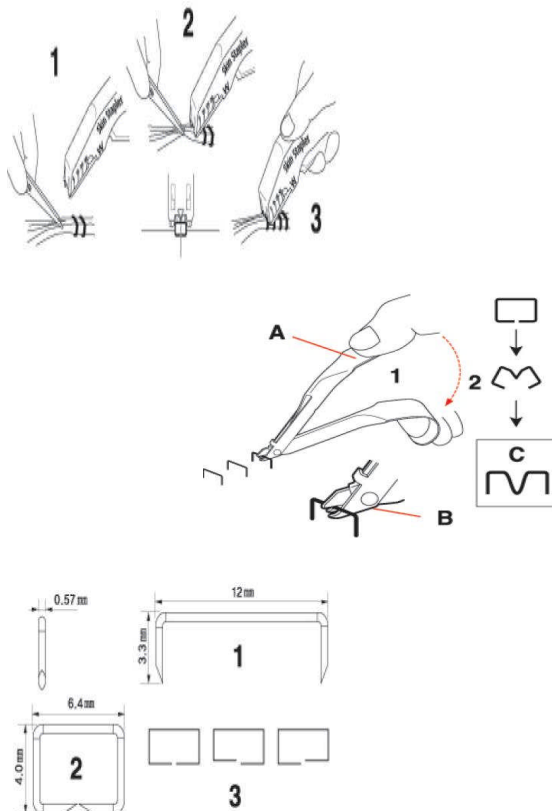

Gebrauchsanweisung:

- greifen Sie die Wundkanten gleichmäßig nacheinander mit einem Instrument zur Wundadaptierung.
- platzieren sie die Zentrumsmarkierung in die Mitte zwischen die Wundkanten
- den Hebel mit gleichmäßigem, festem Druck vollständig schließen und dann freigeben.
- setzen Sie die untere Klemmbanke des Hautklammer-Entferners zwischen die Klammer und die Haut
- heben Sie den Hautklammer-Entferner erst, wenn Sie den Griff vollkommen durchgedrückt haben und entsorgen Sie die Klammer
- das Hautklammergerät enthält breite Klammern
- ursprüngliche Klammer (1)
- geformte Klammer (2)
- Varianten der geformten Klammer (3)

Wichtig:

Diese Gebrauchsanleitung wurde entworfen, um den Gebrauch des SMI Hautklammergeräts zu vereinfachen. Sie ist NICHT als allgemeine Beschreibung chirurgischer Klammerverfahren und und-techniken sowie der damit verbundenen Komplikationen sind der medizinischen Fachliteratur zu entnehmen.

Achtung:

Achtung- Das Hautklammergerät ist in einem für scharfes Zubehör vorgesehenen Behälter zu entsorgen.
Achtung- Den Hebel des Hautklammergerätes NICHT betätigen, wenn sich im Erfassungsbereich Gewebe befindet, das nicht geklammert werden soll. Dies könnte zu Verletzungen führen.